


# Corona-Selbsttest für zu Hause

Direkt zu Beginn des Abstrichs im vorderen Nasenbereich empfiehlt es sich die Nase mit einem Taschentuch zu putzen. Einerseits wird die Nase frei und andererseits werden eventuell vorhandene Coronaviren durch das Ausschrauben in den vorderen Nasenbereich transportiert. Das Testergebnis wird dadurch deutlich aussagekräftiger.

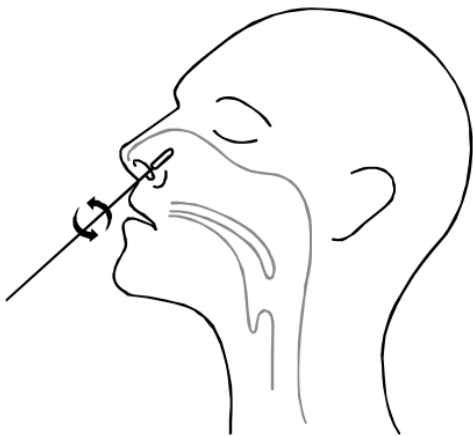


1. Das dickere Stäbchen aus dem Set vorsichtig in ein Nasenloch einführen.

2. Das Stäbchen 5 Mal gegen die Schleimhaut innerhalb des Nasenlochs drehen, um eine ausreichende Probenentnahme zu gewährleisten.

3. Wiederholung mit demselben Stäbchen im anderen Nasenloch, um noch mehr Probenmaterial zu entnehmen.


4. Schrauben Sie die komplette Kappe des Röhrchens ab und rühren Sie mindestens 15 Sekunden in der Flüssigkeit. Drücken Sie das Röhrchen 5 Mal zusammen.

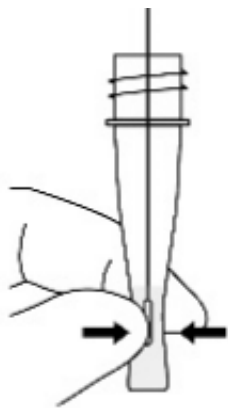


5. Entnehmen Sie das Stäbchen, während Sie die Seiten des Röhrchens zusammendrücken, um die Flüssigkeit aus dem Stäbchen zu pressen.

6. Großen Deckel draufschauben. Kleine Kappe abschrauben und 4-5 Tropfen in die Probenvertiefung mit der Markierung „S“ geben.


4-5 Tropfen

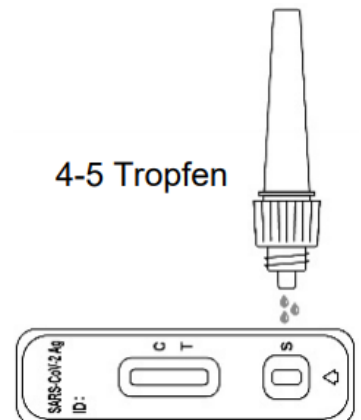


**15-20 min**

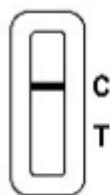

**Negativ**

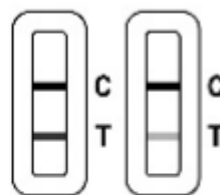

**Positiv**

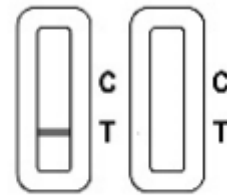

**Ungültig**